
사용설명서(Instruction for Use)

SPIKED LIGAMENT WASHER, JM SPIKED WASHER 외

- 제조업허가번호 : 제1581호
- 품목명 : 금속골고정재
- 품목허가번호 : 제허 03-1129
- 제조원: 제이엠티(주) / 경기도 양주시 백석읍 권율로1203번길 70-39 / Tel : 031_868_0951
- 부작용 보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)

※ 본 의료기기는 사용 전 아래 첨부 문서의 사용설명서 및 주의사항을 확인하고 사용하세요.

첨부 문서 홈페이지: www.jmtmed.com/user-guide/



주 의 : 본 제품은 의료기기이므로 취급자만 판매 및 사용할 수 있음.

본 제품은 1회 사용 의료기기이므로 재사용을 금함.

■ 사용목적: 손상된 뼈를 고정

■ 사용 상 주의사항

1. 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 121℃에서 30분간 고압증기멸균한다.
- 2) 시술자의 경험과 외과적 상황이 보장되어야 한다.

2. 사용방법 및 조작 순서

- 1) 환자의 수술 부위를 절개한다.
- 2) 환자의 뼈 부위에 적합한 크기의 금속골고정재를 선택한다.
- 3) 시술기구를 이용해 금속골고정재를 뼈의 이음 부분에 고정시킨다.
- 4) 금속골고정재가 견고하게 고정 될 때까지 도구를 사용하여 고정시킨다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 실온보관
- 2) 청결하고, 건조한 장소에 보관하며, 가급적 자외선을 피할 것

4. 사용 상 주의사항

- 1) 본 기구를 사용하기 전에 반드시 본 기구의 사용법에 대한 훈련 및 교육을 받고 사용방법에 대해 완전히 숙지한 후 사용할 것.
- 2) 비 멸균제품으로 사용 시 멸균 권고사항에 따라 멸균 후 사용할 것
- 3) 일회용으로 재사용하지 않으며, 제품이 손상되지 않고 완전한 경우에도 재사용할 수 없음
- 4) 제품의 임의의 수정이나 모양 변경을 하지 말 것
- 5) 외과의는 본 품의 사용 지침을 숙지하기 전에 임상을 하여서는 안된다.

6. 금기사항

- 1) 감염 상태의 환자에게는 사용하지 않는다.
- 2) 알콜중독, 정신질환과 같은 정신적 또는 신경증적 조건하에서는 사용하지 않는다.

7. 비 멸균제품으로 사용 전 다음 방법에 따라 소독할 것

- 1) 멸균 방법: 고압증기멸균, 온도: 121℃, 시간: 30분, 압력: 1.5기압
8. 시술 중 시술자가 과도한 외부충격을 가함은 뼈에 손상을 줄 수 있으므로 과도한 외부충격을 가하지 않는다.
9. 시술 후 환자의 과도한 움직임은 초기 고정에 실패를 줄 수 있으므로 과도한 움직임을 삼간다.
10. 제품 사용 시 인대조직의 질이 좋지 않을 경우 사용을 하지 않는다.

■ 사용기간: 해당사항 없음

■ 저장방법: 실온보관