
사용설명서(Instruction for Use)

PEEK CAGE Instrument

PCHL15002 외

- 제조업허가번호 : 제1581호
- 품목명 : 수동식골수술기
- 품목신고번호 : 제신15-315호
- 제조원: 제이엠티(주) / 경기도 양주시 백석읍 권율로1203번길 70-39 / Tel : 031_868_0951
- 부작용 보고 관련 문의처(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)

※ 본 의료기기는 사용 전 아래 첨부 문서의 사용설명서 및 주의사항을 확인하고 사용하세요.

첨부 문서 홈페이지: www.jmtmed.com/user-guide/



주 의 : 본 제품은 의료기기이므로 취급자만 판매 및 사용할 수 있음.

■ 사용목적

골 수술 시 절골, 절제, 천자, 천공 등에 사용하는 수동식 수술기구

■ 사용방법

1. 사용 전 준비사항

- (1) 사용 전 제품에 외관상 변형이나 금이 간 곳, 이물질의 부착 등이 있는지 확인하여야 한다.
- (2) 타 재질에 의한 부식 및 굽힘 발생을 방지하기 위하여 타 기구와 분리 보관한다.
- (3) 제품의 구성품별 번호를 기록 유지하며 먼저 입고된 제품 순위로 사용한다.
- (4) 멸균은 증기 멸균(멸균 조건 : 121℃, 20분동안 또는 134℃, 15분동안)으로 하며 타 기구와 분리 처리한다.

2. 사용방법

- (1) 본 수술용 기구는 정형용 의료기기의 수술 시 척추의 뼈 이식, 또는 척추 이탈 및 만곡증의 고정에 사용하는 기구로써 사용한다.

- (2) 전문의는 수술 목적에 맞게 수술용 기구를 시술 방법에 따라 사용한다.

3. 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 기구의 보관은 원상태가 변형되지 않도록 보관하며 기구 표면이 손상되지 않도록 한다.
- (2) 타 금속 제품과 따로 보관한다.
- (3) 변형 또는 흠집이 생기지 않도록 각별히 주의한다.
- (4) 세척 : 수술기구는 사용 후 혈액이나 이물질이 말라붙는 것을 방지하거나 마른 혈액이나 찌꺼기를 제거하기 위해 먼저 물에 담근 다음 손이나 기계로 세척한다. 물은 비부식성이며 거품이 적고 쉽게 헹궜지는 세제가 첨가된 깨끗한 물을 말한다.
- (5) 검사 : 세척 후 면밀히 검사하며 움직이는 부분은 윤활 상태를 검사하고 작동 상태를 확인한다.

■ 사용 시 주의사항

1. 제품에 생기는 열폭을 방지하기 위하여 소독 시 수증기가 완전히 건조되기 전에는 뚜껑을 열지 말아야 한다.
2. 사용 후 교착부, 이빨, 손잡이 부위에 혈액 또는 인체 추출물이 묻어 있을 경우 부식의 원인이 되므로 신속히 세척, 건조하여 보관한다.
3. 반드시 수술 용도에 알맞게 사용하며 무리한 외부 충격이나 작동을 피하여야 한다.
4. 보관 및 사용 시 문제가 발생하면 제조사에 연락을 취하여 사후 조치 및 재발 방지를 강구하여야 한다.

■ 유효 기간

해당 사항 없음

■ 보관조건 및 저장방법

건조한 실온 보관