
사용설명서(Instruction for Use)

Cannula

JMDC-L15 외

■ 제조업허가번호 : 제1581호

■ 품목명 : 의료용결찰사수송기및운반

기 ■ 품목신고번호 : 제신21-39호

■ 제조원: 제이엠티(주) / 경기도 양주시 백석읍 권율로1203번길 70-39 / Tel : 031_868_0951

※ 본 의료기기는 사용 전 아래 첨부 문서의 사용설명서 및 주의사항을 확인하고 사용하세요.

첨부 문서 홈페이지: www.jmtmed.com/user-guide/



주 의 : 본 제품은 의료기기이므로 취급자만 판매 및 사용할 수 있음.

■ 사용목적

의료용 결찰사를 수송하거나 운반하는 기구.

■ 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 사용 전 사용설명서를 숙지하여야 한다.
- 2) 의사 또는 의료 전문가만 사용한다.
- 3) 제품을 사용할 때 과도한 힘을 가하지 않는다.
- 4) 제품의 외관을 육안으로 손상 여부를 점검한다.
- 5) 멸균
 - ㉠ 본 제품은 비멸균 제품임으로 사용 전에 121℃에서 20분(134℃에서 10분간) 증기멸균(습열멸균) 후 사용해야 한다.
 - ㉡ 본 제품은 재사용 가능 제품이며 사용자 멸균을 하여 재사용 전까지 멸균 상태를 유지해주어야 한다.

나. 사용방법

- 1) 정해진 용도와 정해진 방법으로 사용한다.
- 2) 오염된 기구와 멸균된 기구가 섞이지 않도록 한다.
- 3) 의료결찰안내기와 관절경이 들어갈 수 있는 포털을 만들고 모니터를 보면서 의료결찰안내기의 천자부를 봉합부위에 삽입한다.
- 4) 봉합침을 의료결찰안내기 삽입부에 관을 통해 삽입한다.
- 5) 손잡이를 이용하여 의료결찰안내기 위치를 바꿔가며 봉합한다.
- 6) 외부로 나온 봉합침을 잘라 내고 의료결찰안내기를 제거한 후 봉합사끼리 묶어 봉합술을 완료한다.

다. 사용 후 보관 및 관리 방법

- 1) 세척방법 : 사용된 기구는 사용 후 혈액이나 이물질이 말라붙는 것을 방지하거나 마른 혈액이나 이물질을 제거하기 위해 먼저 기구를 최소한 1분 동안 효소 세척제에 담가 두십시오. 세척 솔이나 천으로 눈에 띄는 오염을 닦아 내고 초음파세척기를 이용하여 세척을 하십시오.
- 2) 세척 단계 후에 탈염수로 충분히 헹구고 기구를 건조시킨다.

■ 사용시 주의사항

- 1) 어떠한 상황에서도 본 제품이 다른 제조업체들의 구성 요소들과 시술하는데 사용되지 않아야 한다. 만약 그러한 경우에 사용되었다면 본 업체는 그 시술에 대한 어떠한 책임도 지지 않는다.
- 2) 의료용 이외의 목적으로 사용을 금하며 전문 의료인 이외에는 사용하지 않아야 한다.
- 3) 기구의 변형이나 손상이 발견되면 제조회사에 연락하여 사후조치 및 재발 방지를 강구한다.
- 4) 부작용
 - ① 부적절한 기구의 사용이나 기구 파손의 경우, 신경성 손상, 통증, 마비, 또는 관절의 손상
 - ② 기구가 올바르게 세척 및 살균되지 않은 경우의 감염
 - ③ 기구의 잘못된 배치나 미끄러짐으로 인한 혈관 압박, 신경 손상
 - ④ 특정 기구를 본의 아니게 놓침으로 발생하는 손상
 - ⑤ 기구의 잘못된 유지, 세척 또는 의도한 사용법에 적합하지 않을 시, 부식, 분해, 뒤틀림 그리고 파손 또는 시술자 또는 환자에게 부상을 입힐 수 있다.
 - ⑥ 대부분의 기구들은 이식에 부적합한 물질로 만들어지고 있으며 기구가 파손될 경우, 알려지, 감염, 또는 금속 요소에 관련된 생물학적인 합병증 등이 수술 후 유발될 수 있으므로 기구의 파편은 절대로 환자 몸 안에 남아있어서는 안 된다.
- 5) 보관조건 및 저장방법
 - ① 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

6) 본 제품은 재사용 비멸균 의료기기임

■ 유효 기간

해당 사항 없음

■ 보관조건 및 저장방법

청결, 건조 그리고 적절한 온도