
사용설명서(Instruction for Use)

Peek Cage Holder

LCHB 외

- 제조업허가번호 : 제1581호
- 품목명 : 수동식골수술기
- 품목신고번호 : 제신19-293호
- 제조원: 제이엠티(주) / 경기도 양주시 백석읍 권율로1203번길 70-39 / Tel : 031_868_0951

※ 본 의료기기는 사용 전 아래 첨부 문서의 사용설명서 및 주의사항을 확인하고 사용하세요.

첨부 문서 홈페이지: www.jmtmed.com/user-guide/



주 의 : 본 제품은 의료기기이므로 취급자만 판매 및 사용할 수 있음.

■ 사용목적

골 수술 시 절골, 절제, 천자, 천공 등에 사용하는 수동식 수술기구

■ 사용방법

1. 사용 전 준비사항

- 1) 제품 외관에 이물질 및 파손 여부를 점검한다.
- 2) 사용 전에 반드시 멸균하여 사용한다. 권장 멸균법은 아래와 같다.

① 멸균 방법 : 고압증기멸균

② 멸균 조건 : 134℃ , 20분 이상

2. 사용방법

1) 골 수술부위에 케이지가 삽입될 수 있는 공간이 확보된 것을 확인한다.

2) 삽입할 케이지의 크기를 결정한다.

3) 요추부 수술의 경우

① Lumbar Peek Cage Holder Body(LCHB)에 Lumbar Peek Cage Holder Rod(LCHR-M3외)를 결합하여 케이지를 홀딩한 후, 수술부위에 케이지를 삽입한다.

4) 경추부 수술의 경우

① Cervical Peek Cage Holder Body(CCHB-14 외)에 Cervical Peek Cage Holder Rod(CCHR-M2.5 외)를 결합하여 케이지를 홀딩한 후, 수술부위에 케이지를 삽입한다.

3. 사용 후 보관 및 관리

1) 사용 후 즉시 깨끗하게 세척하여 건조시킨 후 보관한다.

2) 실온의 건조한 곳에서 보관한다.

■ 사용시 주의사항

1. 사용 시 주의사항

가. 사용설명서를 잘 숙독하고 숙련된 의사가 사용할 것

나. 외부적으로 손상이 되면, 사용을 중지한다.

다. 기구의 수리, 개조를 하지 말 것.

라. 사용 전 반드시 멸균소독하고 사용 후 세척 보관한다.

■ 유효 기간

해당 사항 없음

■ 보관조건 및 저장방법

실온 건조한 보관