
사용설명서(Instruction for Use)

PULL OUT PIN

20053-1 외

- 제조업허가번호 : 제1581호
- 품목명 : 의료용천자기
- 품목신고번호 : 서울 제신 05-119 호
- 제조원: 제이엠티(주) / 경기도 양주시 백석읍 권율로1203번길 70-39 / Tel : 031_868_0951

※ 본 의료기기는 사용 전 아래 첨부 문서의 사용설명서 및 주의사항을 확인하고 사용하세요.

첨부 문서 홈페이지: www.jmtmed.com/user-guide/



주 의 : 본 제품은 의료기기이므로 취급자만 판매 및 사용할 수 있음.

■ 사용목적

생체 조직 등을 천자하는 기구. 송곳(drill), 리머(reamer)등이 있으며 뼈에 보형물을 삽입하기 위하여 천자된 부위를 확대하는 데에 사용하는 기구를 포함한다.

■ 사용방법

1. 파손된 심자인대를 제거한다.
2. 이식건(Autograft, Allograft)을 선택,채취,준비한다.
3. 귀가 없는 Pullout pin(천자기)를 이용하여 경골터널을 마련한다.
4. 이식건을 귀가 있는 Pullout pin(천자기)의 끝부분(귀)에 걸어 경골에서 대퇴골까지 연결한다.
5. 각종 고정 재료를 이용하여 이식건을 고정한다.

■ 사용시 주의사항

1. 사용상 주의사항
 - 1) 사용방법을 숙지하고 숙련된 의사가 사용할 것
 - 2) 외부적으로 손상이 되면, 사용을 중지한다.
 - 3) 기구의 수리, 개조를 하질 말 것
 - 4) 사용 전 반드시 멸균소독하고 사용후 세척 보관한다.
2. 사용 전 준비사항
 - 1) 사용 전 멸균소독한다.
3. 사용 후 보관방법
 - 1) 상온의 건조하고 통풍이 잘되는 장소에 /보관하며 고온 다습한 곳을 피할 것
 - 2) 기구는 사용 후 즉시 세척하여 보관할 것

■ 유효 기간

해당사항 없음

■ 보관조건 및 저장방법

1. 상온의 건조하고 통풍이 잘 되는 장소에 보관하며 고온 다습한 곳을 피할 것
2. 기구는 사용 후 즉시 세척하여 보관할 것